

Dragi uporabnik Wintecare T-Plus,

Spodaj so koristni namigi za kombiniranje uporaba prevodne kreme z različnimi modalitetami.

PREDLOGI

Z vašim T-Plus vedno uporabljajte WINTECARE "A+ prevodno kremo/gel". Skupaj so bili posebej testirani za pravilno uporabo, kar zagotavlja boljšo vzdržljivost vaših elektrod in optimalno delovanje vašega T-Plus. Različne kreme/losjoni lahko negativno vplivajo na rezultat zdravljenja in vzdržljivost opreme.


Kadarkoli aplicirate kremo na telo jo enakomerno razporedite po koži dokler ni več očitno vidna.

Natančneje :

1. **Standard RESISTIVA:** " pol gumba " kreme (enojni pritisk na pumpico) zadostuje za obdelavo površine 400 kvadratnih cm. Dodaj kremo samo v primeru, če koža postane popolnoma suha.
2. **Standard KAPACITIVA:** priporočamo uporabo tega načina BREZ KREME za maksimiranje globokega učinka. V primeru, da je treba drseti elektrodo, je "pol gumba" kreme dovolj (enojni pritisk pumpice) za zdravljenje površine 400 kvadratnih centimetrov . Dodaj kremo samo v primeru, če drsenje postane težko.
3. **RESISTIVA brez kreme (RDEČA):** priporočamo uporabo tega načina BREZ KREME
4. **DIATERMIČNA FIBROLIZA:** "pol gumba " kreme (enojni pritisk na pumpico) zadostuje za obdelavo površine 400 kvadratnih cm. Dodaj kremo samo v primeru, če koža postane popolnoma suha.
5. **KOMPLET ZA STATIKO IN DOZIMETRIJO:** posebne lepilne plošče NE zahtevajo kreme. Če so na koži kozmetični izdelki ali krema jo odstranite z vlažno krpo in prilepite lepilno ploščo na suho kožo.


Spodaj nekaj slik prikazuje PRAVILNO in NAPAČNO uporabo od kreme:

PRAVILEN NANOS / PRIMERNA KOLIČINA KREME

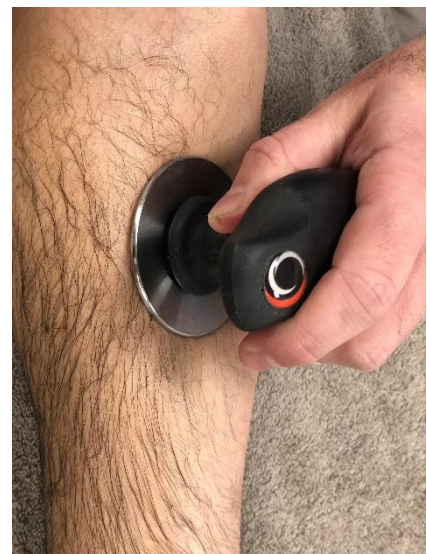

Krema NI očitno vidna na koži = PRAVILNO

NAPAČEN NANOS / PRESEŽEK KREME

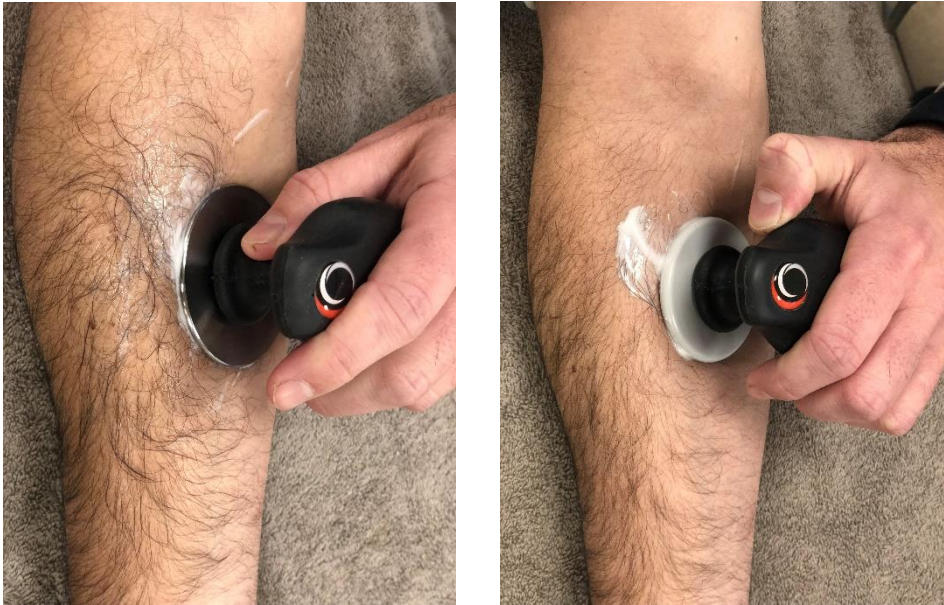

Losjon / krema je očitno vidna na koži = NAPAKA

KONČNA OPOMBA

Napačna uporaba kreme lahko naredi zdravljenje manj udobno in lahko negativno vpliva na dolgotrajno obstojnost kapacitivne elektrode.

PRIMERJAVA MED »NEPOŠKODOVANO« IN ELEKTRODO KI »PROPADA«.



Poslabšuje se elektroda na levi strani (mat barva)
Neokrnjena elektroda na desni strani (ima sijaj)

Upamo, da vam bo ta kratek zapis v pomoč in vam izboljšal izkušnjo z vašim T-Plus!